



Codice articolo e descrizione
Item number and description

T5106
Jellybag Gel termico caldo& freddo cm.26x16 - 1 pezzo
Jellybag Gel Hot&cold cm.26x16 - 1 piece

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

INTRASTAT 39249000
EAN 8024112006271
ITF 08024112930545

Imballo - Packaging

CONFEZIONE
Pezzi/confezione - pcs/box: 1
Peso netto a conf. - net weight for box (gr): 400
Packaging cartoncino eurosloot e sacchetto in PE
eurosloot card and PE bag

CARTONE
Confezioni/cartoni - boxes/carton: 24,00
Cartone - Carton size cm. (LxLxH.) 38.0x28.0x20.0
Peso cartone - weight of carton (kg): 10,10

PALLET
Palletizzazione standard - standard palletizing: 32
Colli per strato - cartons/floor 8
N° strati - floor nr: 4

Uso e conformità - Uses and certificates

Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions



Hot & Cold Gel pack-per applicazioni calde e fredde Riutilizzabile, resistente e pratico. Istruzioni per applicazione a caldo: MICRONDE : Posizionare il prodotto piatto nel microonde con sotto un panno. Riscaldare per 40 secondi ad un'intensità media o al 50%. Rimuovere e distribuire il gel all'interno della borsa in modo tale che si distribuisca il calore uniformemente e ripetere questa operazione fino a temperatura desiderata. (non superare la temperatura di 65°) Interrompere immediatamente il riscaldamento se la borsa si espande eccessivamente Istruzioni per applicazione a freddo: FREEZER Posizionare il prodotto nel freezer per almeno 3-4 ore oppure per tutta la notte. Posizionare il prodotto all'interno della borsa frigo o refrigeratore. Uso esterno. Utilizzare sempre un panno per maneggiare ed applicare. Questo articolo non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Origin Extra UE

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Resi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.

